


# Utilisation d'un fauteuil lève-personne (1 moteur)

1-Basculez le fauteuil vers l'avant.

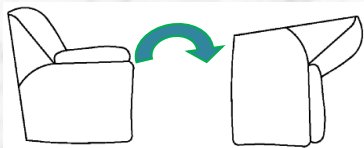


2-Prendre le sac qui contient les items de branchement que vous trouverez à l'intérieur du dos en arrière du meuble.

Contenu du sac de plastique



Branchez selon les dessins suivants.

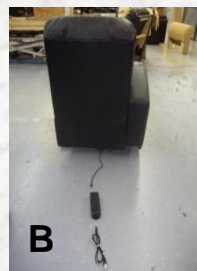

A & B: Branchez les fils au transformateur et passez-les sous la base.

Utilisation du Système 1 moteur



Soulevez le fauteuil.

et/ou

Fermez le dos et l'appui-pied.

Descendez le fauteuil.

et/ou

Inclinez le dos et ouvrez l'appui-pied.

## Pour votre sécurité

- \*Ne pas refermer si quelqu'un ou quelque chose se trouve sous l'appui-pied.
- \*Ne pas descendre du fauteuil si l'appui-pied est ouvert.
- \*Ne pas laisser un enfant utiliser le fauteuil sans surveillance.
- \*Débranchez le transformateur quand le meuble n'est pas utilisé.